

BLUE LIGHT
PROFESSIONAL

NAGEL
KORREKTUR



Step by Step Anleitung BLUE LIGHT professional Gel hard



Vorbereitung

Die Nagelspitze und Nagelplatte mit dem Diamantschleifer glätten und mit dem RUCK® NAGELKORREKTUR Cleaner reinigen und entfetten. Das RUCK® NAGELKORREKTUR BLUE LIGHT professional Gel hard 10 Minuten vor der Behandlung aus dem Kühlschrank nehmen.



Vortamponieren

Die peclavus® POD0med Vorbehandlung Tinktur in den Nagelfalz träufeln. 5-8 Minuten einwirken lassen, um die optimale Beruhigung zu erhalten. Nagelfalz und Nagelspitze nochmals mit dem Nagelfalz-instrument nachreinigen und anschließend tamponieren.



RUCK® Nagelkorrektur BLUE LIGHT professional Gel hard auftragen und die Spange modellieren

Das RUCK® NAGELKORREKTUR BLUE LIGHT professional Gel hard auf den Nagel auftragen und mit dem Nagelfalz-instrument formen. Die Masse muss hierzu ohne Druck modelliert und zu den Nagelfalzen abgeflacht werden. Hierbei ist zu beachten, dass das Gel nicht höher als 2 mm aufgetragen wird und nicht den Nagelfalz berührt. Zur besseren Haftvermittlung vorab den RUCK® NAGELKORREKTUR Primer mit einem Tupfer auftragen und luft-trocken lassen.



RUCK® Nagelkorrektur BLUE LIGHT professional Gel hard aushärten lassen

Nach erfolgreichem Auftragen wird das Gel für 60 Sekunden mit der RUCK® NAGELKORREKTUR BLUE LIGHT professional LED-Lampe ausgehärtet. Nach dem Härtungsprozess entsteht eine Dispersions-schicht, welche unbedingt entfernt werden muss. Hierzu empfehlen wir den RUCK® NAGELKORREKTUR Cleaner. TIPP: Beim Aushärten kann der Nagel mithilfe des Nagelfalz-instrument oder einer Stopf-tamponade angehoben werden. Damit verstärkt sich die Vorspan-nung der Modellierspange.



Unebenheiten korrigieren

Unebenheiten der Modellierspange können mit einem Hartmetallfrä-ser korrigiert werden. Bitte beachten Sie, dass die Gesamthöhe der Spange nicht mehr als 2 mm betragen sollte.



Endtamponieren

Die Vortamponade oder Stopftamponade durch eine neue Nagelfalztamponade (Copoline) ersetzen. Zur Beruhigung mit der peclavus® POD0med Nachbehandlung Tinktur beträufeln. 5-8 Minuten einwirken lassen, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Die Modellierspange wächst mit dem Nagelwachstum raus und kann je nach Therapieverlauf wiederholt werden.

RUCK®

hellmut-ruck.de